

Zdravé sedenie pre každého


□ Dynasit LIFE

□ Dynasit COMFORT

□ Dynasit LIFE PLUS

□ Dynasit LIFE AIR

□ Dynasit COMFORT PRO

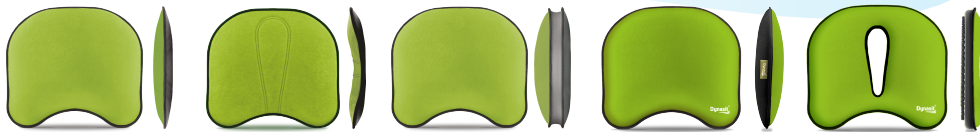

DYNASIT LIFE

DYNASIT COMFORT

DYNASIT LIFE+

DYNASIT LIFE AIR

DYNASIT COMFORT PRO



8 438520 536112



8 438516 417357



8 438518 618615



8 438520 724311



8 438527 417254

ZDRAVOTNÉ ÚČINKY	Aktivuje vzpriamené držanie tela	Bráni statickému preťažovaniu	Aktivuje krvný obeh	Aktivuje koncentráciu	Posilňuje chrbtové a brušné svalstvo	Zmierňuje tlak na kostrč
Dynasit LIFE	✓	✓	✓	✓	✓	✗
Dynasit COMFORT COMFORT PRO	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Dynasit LIFE PLUS	✓	✓	✓	✓	✓	✗
Dynasit LIFE AIR	✓	✓	✓	✓	✓	✗



MLAD s.r.o. | Pstruhárska 5 | 97251 Handlová | SR

Návod na použitie

Dynamickú podložku Dynasit položte spodnou (netextilnou) plochou na sedadlo stoličky tak, aby jej vykrojená časť smerovala ku kolenám. Zo začiatku sedávajte na mierne nafúkanom vankúši len 5-10 minút a opakujte 3-5krát denne! Objemom vzduchu vo vankúši regulujete intenzitu dynamiky sedenia. Sadnite si na približne 2/3 sedacej časti vankúša a mierne rozkročte dolné končatiny. Chodidlá odporúčame opierať celou plochou o podlahu. Sedte uvoľnene a nebráňte sa zmenám polôh. Nedajte sa odradiť, ak budete cítiť mierne bolesti v krížovej oblasti. Je to pozitívna reakcia – obyčajná únava svalov, ktoré neboli na posilňovanie zvyknuté. Nafukovanie: Všetky modely okrem COMFORT PRO sa nafukujú ústami alebo na to určenými mini pumpami prostredníctvom klasickej ventilky. Model COMFORT PRO sa nafukujú prostredníctvom mini pumpy, ktorá je súčasťou balenia. Pri potrebe sfúknuť COMFORT PRO nechajte ihlu pumpy zastrčenú vo ventilke a tlačte na plochu vankúša až kým nevyпустíte požadované množstvo vzduchu.

Kontraindikácie:

Dynasit nie je vhodný pri akútnych zápalových ochoreniach pohybového a nervového systému, pri závratoch. Ak máte nezhojené zlomeniny kostrče, chrbtice alebo panvy, nesaďte na Dynasite!

Ošetrovanie a údržba:

Neperte vankúš v práčke! Sedacia časť sa ľahko čistí kefkou a mydlom. Nenašívajte nič na vankúš! Mohlo by dôjsť k poškodeniu nafukovacej časti vankúša. Pozor na ostré predmety! Používajte vankúš pri teplotách prostredia od 8-40 C.

Osobitné podmienky použitia:

Maximálna nosnosť Dynasitu je 120kg.

Inštalácia mini pumpy:

Mini pumpa je súčasťou balenia len pri modeli COMFORT PRO.